

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



Avant de nettoyer le produit.
Nous recommandons d'enlever la mini-éclisse de doigts.
Puis de la replacer.

ORLIMAN.



Dispositif médical de classe I
Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes
Pour toutes informations complémentaires, contacter :
SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.
NOT_ManuEasyBoxer4-5_180104_OrV0

ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana
Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona
Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/L154 Edition : 01/2018 - Visuels non contractuels



MANU EASY BOXER®
4^{ÈME} ET 5^{ÈME} METACARPES

› **ATTELLE DE POIGNET/DOIGTS**

ORLIMAN.

CONTENU/DESCRIPTION

Attelle de poignet/doigts Manu Esay Boxer® 4^{ème} et 5^{ème} métacarpes :

- 1 Éclisse palmaire modulable,
- 1 Éclisse dorsale modulable,
- 1 Mini-éclisse de doigts modulable.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Fracture du 4^{ème} et du 5^{ème} métacarpes, Traumatisme du poignet/main/doigts, Immobilisation post-opératoire.

COMPOSITION

Extérieur : 95% Polyester, 5% Spandex,
Mousse intérieure : 100% Polychloroprene,
Intérieur : 100% Polyamide,

TAILLANT

Modèle gauche et droite.

TAILLE	TOUR DE POIGNET (CM)
1	14 - 16
2	16 - 18
3	18 - 20

MISE EN PLACE

A (figure 1)

- Enfiler l'attelle Manu Easy Boxer® en prenant bien soin d'aligner l'éclisse palmaire dans l'axe formé par la paume de la main et l'avant-bras.

B (figure 2)

- Serrer le système de lacet au niveau du poignet.

C (figure 3)

- Serrer la sangle située au niveau du pouce et l'index.

D (figure 4)

- Serrer enfin la sangle située au niveau des doigts immobilisés puis fixer avec la bande auto-agrippante.
- Si nécessaire, ajuster la tension au maintien souhaité.

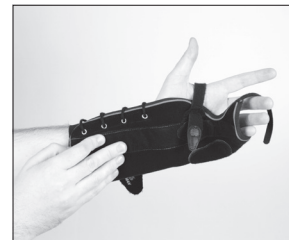


Figure 1



Figure 2

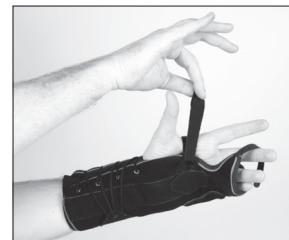


Figure 3



Figure 4



PLUS D'INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.orliman.fr