

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Conduite déconseillée.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



Dispositif médical de classe I

Fabricant et/ou distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT_BotteMarche_Botimed_150527_V0



BOTIMED® BASSE ET HAUTE

› BOTTE DE MARCHÉ



CONTENU/DESCRIPTION

Une botte de marche Botimed® Basse ou Haute :

- 1 chausson enveloppant,
- 1 coussin de protection,
- 1 coque d'immobilisation avec semelle profilée antidérapante en forme de balancier.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS BOTIMED® HAUTE :

Fracture du pied, de la cheville et du tiers inférieur de la jambe, entorse grave de la cheville.

INDICATIONS BOTIMED® BASSE :

Entorse grave de la cheville, fracture de la cheville, des malléoles et des métatarses.

COMPOSITION

- Baleines : Aluminium
- Chausson : Polyester 50%, Mousse 50%
- Botte : Nylon 85%, Fibre de verre 15%

TAILLANT BOTIMED® HAUTE :

TAILLE	POINTURE	HAUTEUR BOTTE (CM)
1	< 39	38
2	39 - 42	41
3	42 - 45	44

TAILLANT BOTIMED® BASSE :

TAILLE	POINTURE	HAUTEUR BOTTE (CM)
1	< 39	38
2	39 - 42	41
3	42 - 45	44

MISE EN PLACE

A (figure 1)

- Ouvrir entièrement la botte, insérer le pied à l'intérieur du chausson et refermer les velcro® en plaçant le coussin fixe au niveau du coup de pied.
- S'assurer que l'articulation est maintenue à 90°.

B

- Refermer le système de fermeture par velcro® dans l'ordre de la figure 2.

C (figure 4)

Finir la mise en place en ajustant le maintien de façon à ce que l'articulation tibio-tarsienne soit parfaitement immobilisée.

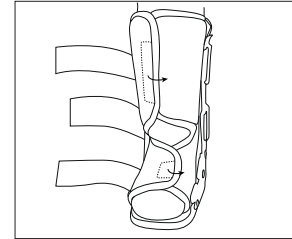


Figure 1

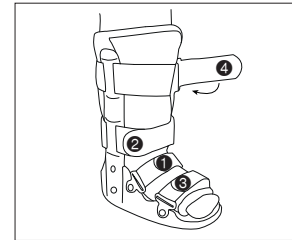


Figure 2



Figure 3



CONSULTEZ
LA VIDÉO
DE MISE EN PLACE