

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué à même la peau avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30 °C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent.



Conserver le produit à température ambiante.



ORLIMAN.



Dispositif médical de classe I

Distributeur: SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter:

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT_CheviX_181206_OrV1



ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia

Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/L165 - Edition : 12/2018



CHEVIX®

› CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE



ORLIMAN.

CONTENU/DESCRIPTION

Une cheville ligamentaire **CHEVIX** :

- 1 cheville,
- 1 strapping,
- 1 sangle élastique.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Traumatisme de la cheville avec entorse latérale ou entorse de Chopart légère, prévention et reprise d'activité après entorse, idéal pour la reprise sportive.

COMPOSITION

- Polyamide 100 %,
- Polyester 30 %,
- Élasthanne 20 %.

TAILLANT

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE* (CM)
0	17 - 20
1	20 - 23,5
2	23,5 - 27

* 2 cm au-dessus de la malléole.

MISE EN PLACE

A

- Enfiler la cheville par l'avant du pied. (figure 1)
- Vérifier que le produit est centré sur la cheville et refermer les fixations auto-agrippantes suivant l'ordre indiqué. (figure 2)



Figure 1



Figure 2

EN FONCTION DE LA PATHOLOGIE, PLACER LA SANGLE ÉLASTIQUE ET LE STRAPPING :

B

FORM STRAPPING - ENTORSE LATÉRALE :

- Placer la sangle sous le pied (fixations autoagrippantes vers le haut) de manière à avoir une longueur égale de chaque côté du pied. (figure 3)
- Tendre la sangle externe sur le cou-de-pied en l'amenant vers l'arrière de la cheville. Tout en maintenant la tension, rabattre la sangle vers l'avant en contournant la cheville au niveau du tendon d'Achille. La fixer sur elle-même avec la fixation autoagrippante, au niveau du cou-de-pied. (figure 4)

- Répéter l'opération avec la sangle interne, de manière symétrique.
- Positionner le strapping comme indiqué ci-dessous **D**.

NOTE : En cas d'œdème : Possibilité d'enlever la sangle élastique.

C

CHOPART STRAPPING - ENTORSE DE CHOPART :

- Repérer le marquage bleu au-dessus du pied. Fixer la sangle sur l'avant de la cheville et réaliser 2 tours de l'avant pied en allant chercher le 5^e métatarse. (figure 5)
- À la fin du second tour, exercer une légère tension afin d'étendre la sangle en passant sur le cou-de-pied et verrouiller au-dessus de la malléole interne. Éviter d'attacher la fixation autoagrippante sur le tendon d'Achille. (figure 6)

- Positionner le strapping comme indiqué ci-dessous **D**.

NOTE : En cas d'œdème : Possibilité d'enlever la sangle élastique.

D

XSYSTEM STRAPPING - ENTORSE, REPRISSE D'ACTIVITÉ SPORTIVE OU QUOTIDIEN ET PRÉVENTION :


En cas d'entorse, se référer aux points **B** ou **C**.

En cas de reprise d'activité ou de prévention, possibilité d'utiliser le strapping sur la cheville.


Mise en place du strapping :

- Positionner le strapping sous le pied, partie la plus large à l'extérieur du pied. (figure 7)
- Repérer la malléole interne afin que celle-ci se positionne au centre du cercle du strapping, partie plus étroite. (figure 8)
- Refermer à l'aide de la fixation autoagrippante.
- Positionner la seconde partie avec le X sur la malléole externe. Refermer à l'aide de la fixation autoagrippante. (figure 9)


- Ajuster si nécessaire le niveau de maintien.

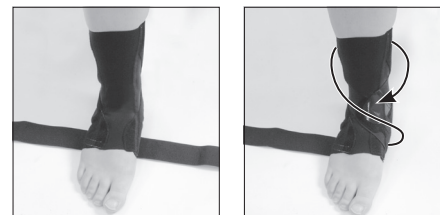


B Figures 3 et 4

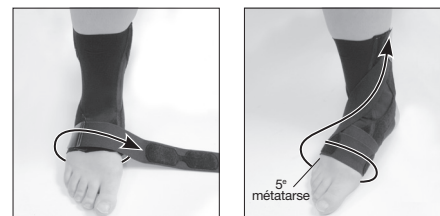

C Figures 5 et 6

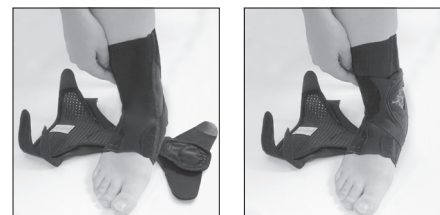

D Figures 7 et 8

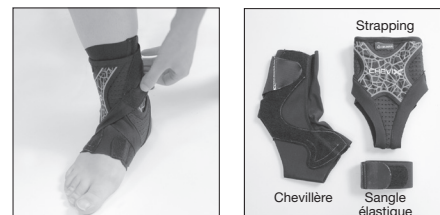

D Figure 9