

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit à même la peau.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

## ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent.



Conserver le produit à température ambiante.



**ORLIMAN.**



Dispositif médical de classe I

Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT\_DynamicFix\_161006\_OrV1

**ORLIMAN S. L. U.**

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana

Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/LB38 Edition : 10/2016



**DYNAMIC FIX®**

**> CEINTURE - CORSET**



**ORLIMAN.**

## CONTENU/DESCRIPTION

Une ceinture - corset Dynamic Fix® :

- 1 coque semi-rigide (blanche),
- 1 coque thermoformable (noire),

Une notice du produit, à lire attentivement.

## INDICATIONS

Avec la coque semi-rigide :

Lumbago, lombosciatique, maladie dégénérative du disque.

Avec la coque thermoformable :

Hernie discale, ostéoporose, spondylarthrose, spondylose avec ou sans stabilité, fracture ou tassement des vertèbres, post-opératoire.

## COMPOSITION

Extérieur : 100% polyamide

Intérieur : 52% polyester + 48% polyamide

Baleines : Polycarbonate

Coque thermoformable : Polyéthylène.

## TAILLANT

TAILLE	TOUR DE TAILLE (CM)
1	75 - 85
2	85 - 95
3	95 - 110
4	110 - 125
5	125 - 140

## MISE EN PLACE

**A** (figure 1)

- Décoller les bandes de rappel postural et étirer la ceinture.

**B** (figures 2 et 3)

- Placer la ceinture par rapport à la colonne vertébrale tout en s'assurant que le coussinet lombaire est bien centré. Étirer la ceinture de telle sorte que la ceinture puisse s'ajuster au dos.

**C** (figures 4, 5 et 6)

- Plaquer la ceinture sur votre ventre en la maintenant avec votre main gauche afin de positionner le premier réglage auto-agrippant. Rabattre la ceinture en ajustant à l'aide des velcros situés sur la face antérieure.
- Régler la compression désirée en tirant sur les cordons de droite et de gauche qui serreront la partie inférieure et supérieure de l'orthèse.

### Utilisation de la coque thermoformable (noire) :

Essayer la coque thermoformable sur le patient et procéder aux réglages avec un pistolet à air chaud si nécessaire.

Retirer la coque semi-rigide (blanche) du fourreau, remplacer par la coque thermoformable préalablement réglée et re-placer le fourreau sur la ceinture.

**ATTENTION : ne pas mettre la coque thermoformable au four thermique ni au four à micro-ondes.**

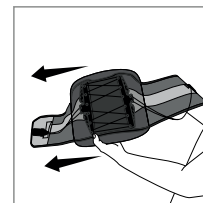


Figure 1

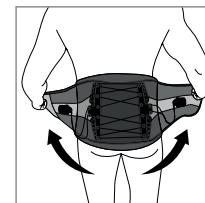


Figure 2

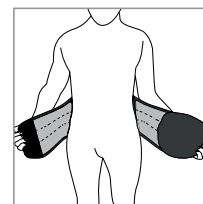


Figure 3

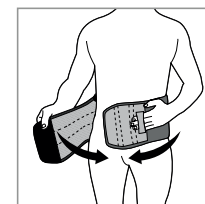


Figure 4

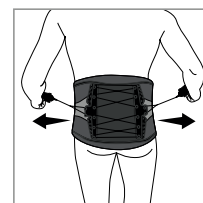


Figure 5

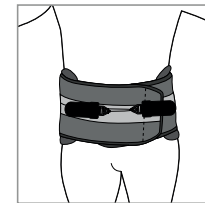


Figure 6



PLUS D'INFOS SUR  
NOS PRODUITS :  
[www.smeurope.fr](http://www.smeurope.fr)