

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,
- Nettoyage professionnel à sec modéré



Conserver le produit à température ambiante.



ORLIMAN



Dispositif médical de classe I
Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes
Pour toutes informations complémentaires, contacter :
SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.
NOT_ManutecPoignet_151207_OrV0



ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana
Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona
Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/LB16 Edition : 12/2015



MANUTEC® POIGNET

> ATTELLE DE POIGNET



ORLIMAN



CONTENU/DESCRIPTION

Attelle de poignet Manutec®
Modèle ambidextre.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Immobilisation du poignet, post-traumatique et post-opératoire, séquelles douloureuses et inflammatoires, instabilité, rééducation.

COMPOSITION

Intérieur : Coton 93%, Élasthanne 7%,
Extérieur : Polyamide 100%,
Milieu : Polyuréthane 100%,
Bandes métalliques et éclisses : Aluminium 100%,
Velcro® : Polyamide 100%

Sans latex.

TAILLANT

TAILLE	TOUR DE POIGNET (CM)
1	14 - 18
2	18 - 22

MISE EN PLACE

A (figure 1)

- Enfiler l'attelle Manutec® sur le poignet traumatisé, ajuster la sangle d'avant-bras (logo Orliman) et fixer grâce au système velcro®.

B (figures 2 et 3)

- Ajuster la sangle "Y" de poignet de manière à ce que les parties ❶ et ❷ restent bien plaquées contre le poignet. Fixer la sangle grâce au système velcro®. Attention la sangle doit revenir se fixer sur elle-même. Pour réaliser le positionnement optimal, vous avez la possibilité de régler la sangle "Y" par l'intérieur (figure 3).

C (figure 4)

- Ajuster les 2 mini-sangles au niveau de la paume de la main et fixer grâce au système velcro®.



Figure 1



Figure 2

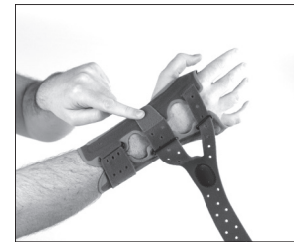


Figure 3



Figure 4



CONSULTEZ
LA **VIDÉO**
DE MISE EN PLACE