

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



ORLIMAN



Dispositif médical de classe I
Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes
Pour toutes informations complémentaires, contacter :
SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.
NOT_NeoRhizoConfort_160705_OrV0

ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia
Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona
Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/LB28 Edition : 07/2016



NEO RHIZO CONFORT®

> ATTELLE DE POUCE



ORLIMAN

CONTENU/DESCRIPTION

Attelle de poignet Neo Rhizo Confort®:

- Éclisse latérale amovible et modelable autour du pouce,
- Éclisse palmaire amovible et repositionnable
- Velcro de pré-positionnement
- Modèle ambidextre.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Rhizarthrose, Entorse de la métacarpophalangienne (MCP), Lésion articulaire et ligamentaire du pouce.

COMPOSITION

Extérieur : 95% Nylon + 5% Spandex

Mousse interne : 100% Chloroprène

Intérieur : 100% Polyamide

Éclisses : Aluminium

TAILLANT

TAILLE	TOUR DE POIGNET (CM)
0	< 14
Universelle	> 14

MISE EN PLACE

A (figures 1 et 2)

- L'attelle de pouce Neo Rhizo Confort® comporte 2 éclisses, une latérale modelable ❶ et une palmaire amovible ❷ selon le pouce traumatisé (droite ou gauche).
- Avant de mettre en place l'attelle, disposer l'éclisse palmaire ❷ dans le fourreau correspondant au pouce traumatisé (figure 2):
 - Pour le pouce droit, dans le logement marqué d'1 bâton,
 - Pour le pouce gauche, dans le logement marqué de 2 bâtons.

B (figure 3)

- Enfiler l'attelle sur le poignet traumatisé en passant le pouce dans le logement prévu à cet effet

C (figure 4)

- Enrouler la sangle double autour du poignet en ajustant à la contention désirée. Fixer à l'aide du velcro® intermédiaire.

D (figure 5)

- Serrer la partie large de la sangle double et ajuster à la contention désirée puis fixer avec le velcro®. Faites de même avec la partie mince de la sangle double.

E (figure 6)

- Si nécessaire, travailler la partie circulaire de l'éclisse latérale ❶ à la forme du pouce. Serrer la sangle du pouce puis fixer avec le velcro®.

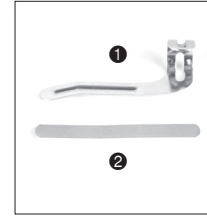


Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



PLUS D'INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.orliman.fr