

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...). Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles. Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée. Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient. Ce produit ne saurait être utilisé autrement que dans les recommandations décrites dans cette notice ou par un professionnel de santé. En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente. Conduite déconseillée.

## ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon neutre (max. 30 °C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas étendre, ne pas repasser et ne pas exposer à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Lorsque vous lavez le produit, veuillez ne pas utiliser des substances abrasives ou corrosives, des produits à base d'alcool, de chlore ou des solvants. Veillez à bien rincer le produit, dans le cas contraire, les résidus de lessive peuvent irriter la peau et détériorer le produit.



- Conserver le produit dans un endroit sec à température ambiante.
- Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.



**ORLIMAN**

Dispositif médical de classe I

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT\_Genuillère\_ROTULIGMOTION\_200723\_OrV2 / NUT.162



ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana

Apdo. de correos 49 - C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

Edition : 2020/07 - LB-I-SME/L193



**ROTULIG MOTION®**

**> GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE  
ET ROTULIENNE**



**ORLIMAN**

## CONTENU/DESCRIPTION

Une genouillère ligamentaire articulée et rotulienne Rotulig Motion® :

- 1 insert rotulien,
- 2 cadrans articulés polycentriques avec butée anti-recurvatum,
- 2 doubles ressorts spiraliiums.

Une notice du produit, à lire attentivement.

## INDICATIONS

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE), États d'irritation (tendinopathie, arthrose légère), Instabilité rotulienne.

## COMPOSITION

Ce produit ne contient pas de latex.

Tissu tricot :

- Polyamide 65%,
- Polyester 25%,
- Élasthanne 10%,


Tissu-éponge intérieur contenant du thermoplastique polyuréthane (TPU) : Polyester 92%, Élasthanne 8%,

Bande anti-glisse : Polyuréthane 100%,

Insert rotulien : Élastomère thermoplastique 100%,

Ressorts spiraliiums : Acier 100%,

Cadrans articulés : Aluminium 100%.

Ce produit est marqué du symbole . Il contient des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

## TAILLANT

TAILLE	TOUR DE GENOU (CM)
1	29 - 33
2	33 - 37,5
3	37,5 - 42
4	42 - 47
5	47 - 53

Existe en 3 coloris.

Pour obtenir le plus grand degré d'efficacité thérapeutique et prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la mieux adaptée. La compression doit être ferme mais confortable.

## MISE EN PLACE

**A**

- La genouillère est livrée avec les cadrans articulés insérés dans leurs emplacements dédiés, de chaque côté du produit, comme indiqué en figure 1.
- Selon l'utilisation souhaitée, laisser les cadrans en place **ou les retirer avec précaution** afin de les remplacer par les ressorts spiraliium.

**B**

- Enfiler la genouillère.
- S'assurer du bon placement de l'insert rotulien autour de la rotule et des cadrans ou ressorts, de part et d'autre du genou.

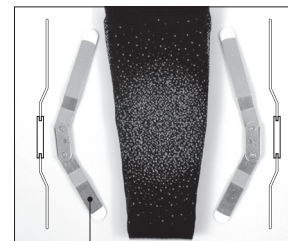


Figure 1

Partie plus courte du cadran vers le bas. Vérifier que les cadrans se plient dans le sens de l'articulation.



PLUS D'INFOS SUR  
NOS PRODUITS :  
[www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)