

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

Conduite déconseillée.

## ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



Dispositif médical de classe I  
Distributeur: SM Europe - 420574626 RCS Rennes  
Pour toutes informations complémentaires, contacter:  
SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.  
NOT\_Should'R\_180618\_OrV1

**ORLIMAN S. L. U.**  
C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana  
Apdo. de correos 49 - C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona  
Valencia - España (Spain)

LB-I-SME / LB69 Edition: 06/2018



SHOULD'R®

> IMMOBILISATION D'ÉPAULE



## CONTENU/DESCRIPTION

Immobilisation d'épaule Should'R®:

- maille filet aérée,
- Velcro® papillons,
- 1 coussinet d'épaule,
- 1 support de coude,
- produit bilatéral.

Une notice de produit, à lire attentivement.

## INDICATIONS

Traumatologie (entorse et luxation) du membre supérieur scapulo-huméral, hémiplegie, post-opératoire.

## COMPOSITION


- Filet: Polyester 100 %,
- Complexe Noir:
  - Extérieur: Polyamide 100 %,
  - Mousse: Polyuréthane 100 %,
- Tissu noir: Coton 100 %.

## TAILLANT

TAILLE	TOUR DE POITRINE (CM)
1	< 95
2	95 - 110
3	> 110

## MISE EN PLACE

**A**

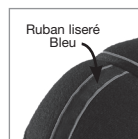

**SENS DE POSE DU PRODUIT:**  
Repérer le code couleur sur le coussinet d'épaule:

Ruban Gris	Épaule gauche
Ruban liseré Bleu	Épaule droite

- Préparer le bandage en fonction de l'épaule à immobiliser.
- Retourner si nécessaire tous les Velcro® papillons.

**B**

- (figure 1) (figure 2) (figure 3)
- Positionner le coussinet de l'épaule sur l'épaule.
  - Placer le bras au niveau de la poitrine.
  - Refermer la sangle et la fixer à l'aide du Velcro®.

**C**

- (figure 4)
- Récupérer la sangle passant dans le dos.
  - S'assurer que la sangle n'est pas vrillée.
  - La fixer sur l'écharpe et ajuster le niveau de maintien.

**D**

- (figure 5) (figure 6)
- Récupérer et placer le coude dans le support.
  - Positionner le support correctement et verrouiller la position coude au corps à l'aide du Velcro®.

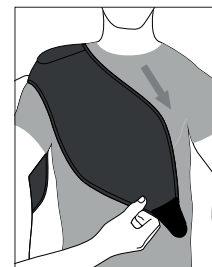


Figure 1



Figure 2



Figure 3

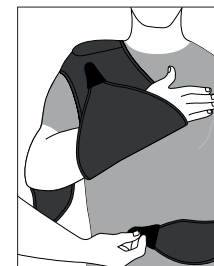


Figure 4

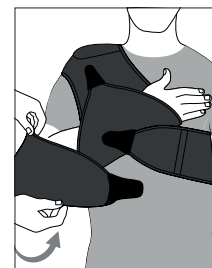


Figure 5

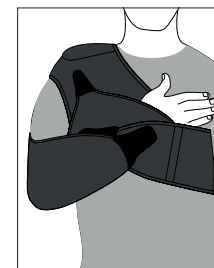


Figure 6



PLUS D'INFOS SUR  
NOS PRODUITS:  
[www.smeurope.fr](http://www.smeurope.fr)