

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Conduite déconseillée.

## ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent.



Conserver le produit à température ambiante.



Dispositif médical de classe I

Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr

Tel : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31

NOT\_Should30-45\_170711\_OrV0



**ORLIMAN S. L. U.**

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia

Apdo. de correos 49 - C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/L145 - Edition : 07/2017



SHOULD 30-45®

› COUSSIN D'ABDUCTION



## CONTENU/DESCRIPTION

Un coussin d'abduction Should 30-45® :

- 2 coussins d'abduction d'épaule 30° ou 45°,
- confortable grâce à une meilleure répartition de la charge,
- modèle bilatéral.

Une notice du produit, à lire attentivement.

## INDICATIONS

Traumatologie du membre supérieur scapulo-huméral, pathologie de la coiffe des rotateurs opérés, post-opératoire.

## COMPOSITION

- 100% polyester,
- Sans Latex,

## TAILLANT

TAILLE	UNIQUE
--------	--------

## MISE EN PLACE

### A (figures 1 et 2)

Adapter la position de la balle par rapport à la longueur de l'avant bras :

- Retirer la sangle Velcro®.
- Glisser la plaque le long du guide jusqu'à l'obtention de la position souhaitée.
- Fixer à l'aide des fixations Velcro®.

### B (figure 3)

- Fixer le coussin d'abduction du côté du bras lésé.
- Ajuster la hauteur en vérifiant que le bras forme un angle à 90°.

### C (figures 4 et 5)

- Positionner le bras sur le coussin et refermer les fixations velcro®.

### D

- Passer la sangle autour du buste comme indiqué (figure 6).
- Fermer la sangle en passant dans la boucle et fixer à l'aide du Velcro® (figure 7).
- Terminer la mise en place en fixant la sangle à l'aide de la fermeture clip (figure 8).
- Ajuster le réglage de la sangle à l'aide des Velcro®.

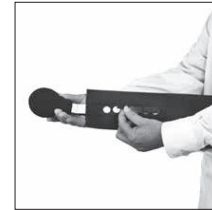


Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8



PLUS D'INFOS SUR  
NOS PRODUITS :  
[www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)