

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 40°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



Dispositif médical de classe I

Fabricant et/ou distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT_Cheviforte_150625_OrV0



CHEVIFORTE®

> CHEVILLÈRE DE CONTENTION FORTE



CONTENU/DESCRIPTION

Chevillère de contention Cheviforte®:

- Tricot élastique extensible avec talon fermé,
- Compression forte et réduite aux extrémités,
- 1 Système de contention à effet proprioceptif.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Entorse bénigne et traitement d'œdème post-opératoire.

COMPOSITION

- Nylon 45%,
- Elasthane 10%,
- Caoutchouc 45%.

TAILLANT

TAILLE	TAILLE DE CHEVILLE (CM)
1	17 - 20
2	20 - 22
3	22 - 24
4	24 - 26
5	26 - 29

MISE EN PLACE

A (figure 1 et 2)

- Enfiler la chevillère telle une chaussette en prenant soin de placer correctement le talon dans la talonnière.



Figure 1



Figure 1



CONSULTEZ
LA **VIDÉO**
DE MISE EN PLACE