



# Genurom Neo<sup>®</sup>

Genouillère ligamentaire articulée réglable




## TRAUMATIQUE

### INDICATIONS :

Traitement pré ou post-opératoire des ligament LCA (modèle antérieur) et LCP (modèle postérieur) .

### PRISE DE MESURE : Tour de cuisse (cm).

	T.1 34 - 41	T.2 41 - 48	T.3 48 - 55	T.4 55 - 62	T.5 62 - 69
				Modèle antérieur	Modèle gauche
				Modèle postérieur	Modèle droit

#### DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE I

Distributeur France : SM EUROPE / ORLIMAN - 20, La Herbetais - 35520 La Mézière (France)  
 Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr  
 Fabricant : ORLIMAN S. L. U. - C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana -  
 Apdo de correos 49 - C.P. 46185 - La Pobla de Vallbona - Valencia - España (Spain).  
 Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com -  
 Export. : Tel. +34 96 274 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com



Visuels non contractuels

# Genurom Neo®

## Genouillère ligamentaire articulée réglable

### NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

#### NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Cher client,  
Nous vous remercions d'avoir accordé votre confiance à un produit Orliman®. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions suivantes, à les conserver, ainsi que l'emballage, pour toute future utilisation. En cas de doute, veuillez contacter votre professionnel de santé ou notre Service Client.  
ORLIMAN S.L.U. garantit tous ses produits, à condition qu'ils n'aient pas été manipulés, ni modifiés dans leur configuration initiale, à l'exception de toute utilisation prescrite sur cette page d'instructions.  
Si les produits sont utilisés en combinaison avec d'autres produits, pièces de rechange ou systèmes, assurez-vous que ceux-ci sont compatibles et qu'ils proviennent de la marque Orliman®. Les produits dont les caractéristiques ont été altérées en raison d'un mauvais usage de tout type sont exclus de la garantie. En cas d'incidents graves liés au produit, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente de votre pays.

#### RÉGLEMENTATION

**MD** Cet article est un dispositif médical de classe I. Il a fait l'objet d'une Analyse de Risques (UNE EN ISO 14971) afin de réduire tout risque éventuel. Selon les résultats de l'analyse des risques, des essais sont réalisés conformément à la réglementation européenne UNE-EN ISO 22523 relative aux prothèses et orthèses.

#### ⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirez le produit et consultez immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

Le port d'une attelle d'immobilisation dont la fonction est de limiter les mouvements rend incompatible la conduite d'un véhicule.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT**, de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

#### CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans cette notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

#### INDICATIONS

Gonarthrose (tibia, fémur ou fémoro-tibiale), post-opératoire (ostéothomie tibiale, prothèse, ...), traitement ou entorse du LLI, traitement du syndrome de l'essui-glace.

#### CONTENU / DESCRIPTION

Une genouillère ligamentaire articulée réglable (antérieure ou postérieure) :  
- 2 jeux de cales pour une limitation en extension de 0° à 40° et en flexion à 90°, 75°, 60° ou 40° ;  
- 1 tournevis.  
**Une notice du produit, à lire attentivement.**

#### COMPOSITION

**Genouillère** : polyuréthane 47 %, polyester 35 %, coton 18 %.  
**Structure** : aluminium 100%.  
**Cales et visserie** : acier 100%.

#### CONSEILS DE CONSERVATION ET DE LAVAGE

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veuillez le conserver dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et à température ambiante. Upon entretien, si le produit est mouillé, retirez l'ensemble des pièces amovibles (baleines, éclisses, etc.) et collez les fixations auto-agrippantes entre elles. Lavez le produit régulièrement à la main, à l'eau tiède (maximum 30° C) et avec du savon neutre. Pour sécher le produit, utilisez une serviette sèche afin d'absorber la plus grande quantité d'humidité possible et laissez-le sécher à plat et à température ambiante. Ne pas le repasser et veillez à ne pas l'exposer à des sources de chaleur directes, telles que : réchaud, appareil de chauffage, rayons directs du soleil, etc. Lorsque vous lavez le produit, ne pas utiliser de substances abrasives, corrosives, ni de produits à base d'alcool, de chlore ou de solvants. Veillez à bien rincer le produit, dans le cas contraire les restes de détergent peuvent entraîner des irritations cutanées et détériorer le produit. Une fois le lavage terminé, si des pièces amovibles ont été retirées, remettez-les dans leur position initiale avant une nouvelle utilisation.



#### MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

**Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :**

#### Réglage de la flexion-extension :

L'orthèse est dotée d'un jeu de cales pour la flexion et la tension.

1. Choisir les cales souhaitées.

Dévisser le couvercle de l'articulation jusqu'à pouvoir introduire la cale sélectionnée.

2. Positionner la cale et revisser le couvercle de l'articulation de manière à le fixer ainsi que la cale. Répéter cette opération pour les deux cotés, dans le sens de la flexion et de l'extension.

#### Mise en place cale de blocage 0° :

3. Dévisser le couvercle de l'articulation et le retirer.

4. Retirer la cale d'extension de 10°.

5. Insérer la cale de limitation d'extension de 0° à la place de la cale de 10°.

6. Étendre complètement l'articulation et insérer la cale de blocage 0° dans la partie postérieure.

7. Vérifier que les cales soient centrés avec l'articulation.

8. Revisser le couvercle de l'articulation de manière à le fixer ainsi que les cales.

#### Mise en place de l'attelle :


9. Libérer entièrement les sangles de maintien afin de faciliter le positionnement et enfiler l'attelle sur la jambe lésée.

10. Faire coïncider l'axe anatomique du genou avec l'axe mécanique de l'attelle.


11. Ajuster et fixer l'attelle avec les sangles auto-agrippantes en commençant par celles de la cuisse **1** et **2**.

12. Terminer la mise en place en ajustant et fixant les sangles auto-agrippantes du mollet **3** et **4**.

Enfin, vérifier les sangles et inviter le patient à se mettre debout et à marcher pour s'assurer que le réglage et la fixation sont corrects.

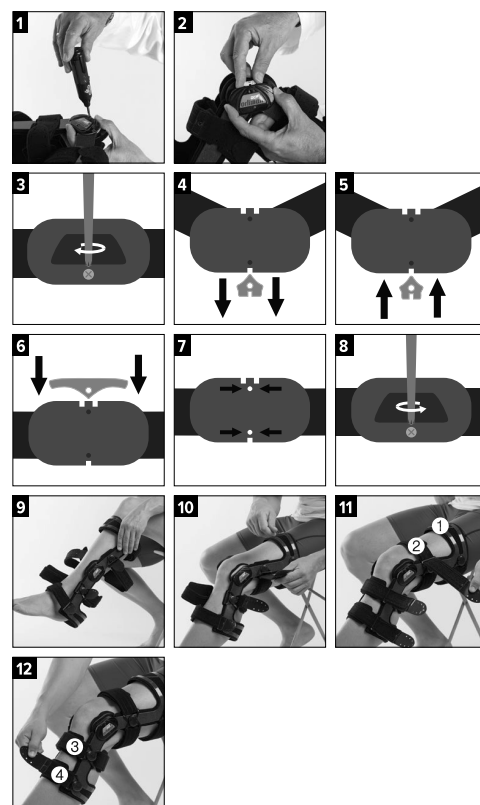

#### PRISE DE MESURE

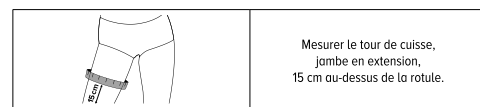

#### TAILLANT

Taille	Tour de cuisse (cm)
T.1	34 - 41
T.2	41 - 48
T.3	48 - 55
T.4	55 - 62
T.5	62 - 69

Modèle antérieur ou modèle postérieur.

Modèle gauche ou modèle droit.