



Ceinture corset

FIXQUICK

Powered by BOA FIT SYSTEM

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirez le produit et consultez immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

Le port d'une attelle d'immobilisation dont la fonction est de limiter les mouvements rend incompatible la conduite d'un véhicule.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé , de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième chiffres représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans cette notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produits à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique) ou de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir accordé votre confiance à un produit Orliman®. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions suivantes, à les conserver, ainsi que l'emballage, pour toute future utilisation. En cas de doute, veuillez contacter votre professionnel de santé ou notre Service Client.

ORLIMAN S.L.U. garantit tous ses produits, à condition qu'ils n'aient pas été manipulés, ni modifiés dans leur configuration initiale, à l'exception de toute utilisation prescrite sur cette page d'instructions.

Si les produits sont utilisés en combinaison avec d'autres produits, pièces de rechange ou systèmes, assurez-vous que ceux-ci sont compatibles et qu'ils proviennent de la marque Orliman®. Les produits dont les caractéristiques ont été altérées en raison d'un mauvais usage de tout type sont exclus de la garantie. En cas d'incidents graves liés au produit, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente de votre pays.

RÉGLEMENTATION

 Cet article est un dispositif médical de classe I. Il a fait l'objet d'une Analyse des Risques (UNE EN ISO 14971) afin de réduire tout risque éventuel. Selon les résultats de l'analyse des risques, des essais sont réalisés conformément à la réglementation européenne UNE-EN ISO 22523 relative aux prothèses et orthèses.

INDICATIONS

Tassements vertébraux, spondylolyse, spondylarthrite, discarthrose, post-opératoire, lombarthrose, hernie discale (sciatgie, cruralgie), ostéoporose, stabilisation lombaire.

CONTENU / DESCRIPTION

Une ceinture corset :

- 3 zones de découpe,
- 2 fixations papillon auto-agrippantes,
- 1 plaque dorsale thermoformable,
- 2 bandes de rappel postural amovibles, avec systèmes d'ajustement Boa® et fixations auto-agrippantes.

Une notice du produit, à lire attentivement.

COMPOSITION

Fibres : nylon 50%, caoutchouc (latex compris) 25%, polyester 15%, polyuréthane 10%.

Systèmes d'ajustement Boa® : nylon 100%, ressort en acier inoxydable 100%.

Plaque dorsale : polyéthylène haute densité 100%.

CONSEILS DE CONSERVATION ET DE LAVAGE

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veillez le conserver dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et à température ambiante. Avant entretien, si le produit en est pourvu, retirez l'ensemble des pièces amovibles (baleines, éclisses, etc.) et collez les fixations auto-agrippantes entre elles. Lavez le produit régulièrement à la main, à l'eau tiède (maximum 30° C) et avec du savon neutre. Pour sécher le produit, utilisez une serviette sèche afin d'absorber la plus grande quantité d'humidité possible et laissez-le sécher à plat et à température ambiante. Ne pas le repasser et veiller à ne pas l'exposer à des sources de chaleur directes, telles que : réchaud, appareil de chauffage, rayons directs du soleil, etc. Lorsque vous lavez le produit, ne pas utiliser de substances abrasives, corrosives, ni de produits à base d'alcool, de chlore ou de solvants. Veillez à bien rincer le produit, dans le cas contraire les restes de détergent peuvent entraîner des irritations cutanées et détériorer le produit. Une fois le lavage terminé, si des pièces amovibles ont été retirées, remettez-les dans leur position initiale avant une nouvelle utilisation.



MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :



Préréglages de la ceinture:

1. Pour adapter la ceinture à la taille idéale de chaque patient(e), le plastron peut être découpé selon les repères indiqués (cf. tableau de correspondance) et les fixations papillon auto-agrippantes repositionnées.

ATTENTION : la découpe doit être effectuée sur les parties les plus enfoncées de la bande (cf. schéma). Cette opération étant irréversible, il est impératif de réaliser un prépositionnement avant de procéder à celle-ci. Pour cela, replier le plastron au niveau des repères sélectionnés et positionner provisoirement les fixations papillon auto-agrippantes. Afin de conserver une contention uniforme, le numéro de repère sélectionné doit être le même de chaque côté.

Mise en place de la ceinture :

2. Repérer le logo Orliman® pour positionner la ceinture dans le bon sens.

Tirer sur les disques de serrage pour les déverrouiller, détacher les bandes de rappel postural et étirer la ceinture.

Centrer la ceinture sur votre colonne vertébrale, le bas de la ceinture doit se positionner sur la base du coccyx.

3. Étirer la ceinture, rabattre la partie gauche vers l'avant et la maintenir sur votre ventre avec votre main gauche.

Rabattre la partie droite de la ceinture avec le système de passe-doigts et la fixer sur la partie gauche avec la zone auto-agrippante.

Ajustement des bandes de rappel postural amovibles :

4. Positionner les 2 bandes de rappel postural amovibles selon les repères indiqués au dos de la ceinture et fixer avec les zones auto-agrippantes.

ATTENTION : afin de conserver une contention uniforme, les deux sangles doivent être positionnées de manière symétrique, selon l'axe de la colonne vertébrale.

Rabattre les bandes de rappel postural vers l'avant, de chaque côté, de manière à obtenir une légère tension. Les fixer sur l'avant de la ceinture avec les zones auto-agrippantes.


5. Les disques de serrage possèdent 2 positions : «verrouillées» quand les disques sont enfoncés au maximum et «déverrouillée» quand ils sont tirés au maximum. Le passage d'un état à l'autre est identifiable par un léger «clic».

S'assurer que les disques sont en position «verrouillée» et procéder au serrage. Tourner simultanément les 2 disques dans le sens des aiguilles d'une montre et ajuster la tension à la compression souhaitée.

Ajustement de la coque thermoformable :

Positionner la coque thermoformable sur le patient et repérer les zones à ajuster. Eloigner la coque du patient et utiliser un pistolet à air chaud pour procéder au formage des zones préalablement repérées. **Afin d'éviter toute brûlure, laisser refroidir à température ambiante avant d'appliquer de nouveau sur le patient.** Répéter les opérations jusqu'à un niveau de confort optimal. Placer ensuite la coque thermoformable préalablement ajustée dans le fourreau prévu à cet effet, en ouvrant la fixation auto-agrippante située au bas de la zone dorsale de la ceinture.

ATTENTION : Cette étape doit être réalisée par un professionnel de santé, ne pas mettre la coque thermoformable au four thermique ni au four à micro-ondes.

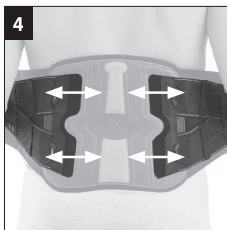

PRISE DE MESURE



Mesurer le tour taille.

TAILLANT

Modèle unique		
Hauteur (cm)	Tour de taille (cm)	Repère de coupe
26	85 - 95	N° 2
	95 - 110	N° 3
	110 - 125	N° 4
	125 - 140	N° 5 - Pas de découpe



SCANNEZ-MOI
& RETROUVEZ LA VIDÉO
DE MISE EN PLACE DE CE PRODUIT.



■ ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elionia

Apdo de correos 49 - C.P. 46185

La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com

Exportación : Tel. +34 96 274 23 33 - E-mail : export@orliman.com

www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe / Orliman - 20, La Herbetais - 35520 La Mézière (France).

Tel. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr



PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS,
DES VIDÉOS DE MISE EN PLACE ET DES CONSEILS SUR :

orliman.fr   

NUT252#3_FixQuick_CeintureCorset

Date de publication : 2021-08

Date de révision : 2025-04 v.3