

## GAVRINIS® Camel

Chaussure thérapeutique  
à usage temporaire (CHUT)



**TVA : 5,5%**

**LPPR : 25,31 €<sup>TTC</sup> l'unité, soit 50,62 €<sup>TTC</sup> la paire**  
7133052

### DOMAINE D'APPLICATION

Rhumatologie, Rééducation, Prévention.

### INDICATIONS

**Pieds diabétiques**, Cou-de-pied fort, Durillons/cors, Métatarsalgie.

### CARACTÉRISTIQUES

- Double ouverture latérale par fermeture éclair, facilite la mise en place de la chaussure.
- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés.
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, amovible, permet le remplacement par une semelle orthopédique.
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité.
- Hauteur du talon : 2,8 cm.
- Épaisseur semelle interne : 8 mm.
- Modèle mixte.

### COMPOSITION

Revêtement extérieur : cuir 100%.  
Doublure intérieure : polyester 100%.  
Empiècements camel : cuir synthétique 100%.  
Fermeture éclair : textile et nylon 100%.  
Semelle extérieure : caoutchouc thermoplastique compact 100%.  
Semelle intérieure : viscoélastique 100%.  
Lacets : coton 100%.  
Cèllets : laiton blanc.

Pour le traitement antibactérien, le produit contient la substance active Pyrrhione de zinc à large spectre antibactérien.

Prise de mesure : Pointure			
Pointure	Code référent 13	ACL 7	Référence
35	8435025949973	6435243	CP08622U35
36	8435025949980	6435244	CP08622U36
37	8435025949997	6435245	CP08622U37
38	8435025950009	6435246	CP08622U38
39	8435025950016	6435247	CP08622U39
40	8435025950023	6435248	CP08622U40
41	8435025950030	6435249	CP08622U41
42	8435025950047	6435250	CP08622U42
43	8435025950054	6435251	CP08622U43
44	8435025950061	6435252	CP08622U44
45	8435025950078	6435253	CP08622U45
46	8435025950085	6435254	CP08622U46

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : [orto@orliman.com](mailto:orto@orliman.com) - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : [export@orliman.com](mailto:export@orliman.com) - [www.orliman.com](http://www.orliman.com)

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbets, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : [orliman@orliman.fr](mailto:orliman@orliman.fr) - [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.


• **GAVRINIS® Camel**


Chaussure thérapeutique à usage temporaire

**⚠ PRÉCAUTIONS**

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec la chaussure. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

**CONSEILS ET MISES EN GARDE**

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit comme des crèmes, pommades ou lotions.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

**MISE EN PLACE**

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

**CONSEIL DE CONSERVATION ET DE LAVAGE :**

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veuillez le conserver dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et à température ambiante. Collez les fixations auto-agrippantes entre elles si le produit en est pourvu.

Il est conseillé de vaporiser un imperméabilisant sur toutes les chaussures en cuir ou en matière synthétique pour nourrir et protéger de l'humidité. Ne jamais utiliser des produits d'entretien caustiques ou corrosifs. Commencez par faire un dépoussiérage à l'aide d'une brosse souple ou d'un chiffon humide. Pour les chaussures ne contenant pas de cuir, lavez les chaussures à la main, à l'eau tiède (maximum 30° C) et avec du savon neutre. Ne pas les repasser et veillez à ne pas les exposer à des sources de chaleur directes, telles que : réchaud, appareil de chauffage, rayons directs du soleil, etc.

