

LIHOU®

Chaussure thérapeutique
à usage temporaire (CHUT)



TVA : 5,5%

LPPR : 25,31 €^{TTC} l'unité, soit 50,62 €^{TTC} la paire
7133052

DOMAINE D'APPLICATION

Rhumatologie, Traumatologie, Post-opératoire, Rééducation.

INDICATIONS

Hallux valgus - Oignons, Orteils en griffe ou en marteau, Pieds rhumatoïdes, Pieds extra-larges, Cou-de-pied fort, Œdème post-opératoire, Pansements épais.

CARACTÉRISTIQUES

- Zone souple et confortable conçue pour s'adapter à l'hallux valgus.
- Ouverture complète.
- Fermeture rapide par languettes auto-agrippantes.
- Avant-pied ajustable.
- Semelle légère et capitonnée.
- Hauteur du talon : 2,5 cm.
- Modèle femme.

COMPOSITION

Tige : 50% Polyester, 44% coton, 5% Polyamide, 1% Élasthanne.

Zone élastique : 82% Polyamide, 18% Élasthanne.

Doublure : 100% Polyester.

Semelle intérieure : 100% Cuir de vachette avec couche de Carbone de 6mm.

Centre de la semelle : Liège et Caoutchouc naturel.

Semelle extérieure : 100% Cuérolite.

Zones auto-agrippantes : 100% Polyamide.

Boucles décoratives : 100% Fer.

Prise de mesure : Pointure

Pointure	Code Référent 13	ACL 7	Référence
35	8435025950740	6435255	CP08652U35
36	8435025950757	6435256	CP08652U36
38	8435025950764	6435257	CP08652U37
39	8435025950771	6435258	CP08652U38
39	8435025950788	6435260	CP08652U39
40	8435025950795	6435261	CP08652U40
41	8435025950801	6435262	CP08652U41
42	8435025950818	6435263	CP08652U42

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbetsais, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr


Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.


- LIHOU® Chaussure thérapeutique à usage temporaire

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec la chaussure. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit comme des crèmes, pommades ou lotions.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

CONSEIL DE CONSERVATION ET DE LAVAGE :

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veuillez le conserver dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et à température ambiante. Collez les fixations auto-agrippantes entre elles si le produit en est pourvu.

Il est conseillé de vaporiser un imperméabilisant sur toutes les chaussures en cuir ou en matière synthétique pour nourrir et protéger de l'humidité. Ne jamais utiliser des produits d'entretien caustiques ou corrosifs. Commencez par faire un dépoussiérage à l'aide d'une brosse souple ou d'un chiffon humide. Pour les chaussures ne contenant pas de cuir, lavez les chaussures à la main, à l'eau tiède (maximum 30° C) et avec du savon neutre. Ne pas les repasser et veillez à ne pas les exposer à des sources de chaleur directes, telles que : réchaud, appareil de chauffage, rayons directs du soleil, etc.

