

CONFORT PLUS®

POIGNET MAIN

Attelle de poignet-main



DOMAINE D'APPLICATION

Post-opératoire, Traumatologie, Rhumatologie.

INDICATIONS

Traumatisme du poignet, entorse, contusion, immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES

Une attelle de poignet-main :

- 1 éclisse palmaire amovible modelable pour l'adulte et l'enfant ; 1 éclisse droite dans la version pédiatrique,
- 2 éclisses dorsales souples (repositionnables sur le modèle universel).

COMPOSITION

Extérieur : polyester 100%.

Mousse intérieure : polyester 100%.

Intérieur : coton 100%.

Éclisses : aluminium et polycarbonate 100%.

TVA : 5,5%

LPPR : 56,64 € / 7132791

Prise de mesure : Tour de poignet Modèle gauche ou modèle droit				
Taille	Tour de poignet	Code Référent 13	ACL 7	Référence
DROIT				
Pédiatrique	< 10 cm	8435025949706	6427019	PM0245.DRP
Enfant	10 - 12 cm	8435025949645	6427017	PM0245.DRE
1	12 - 16 cm	8435025949614	6427014	PM0245.DR1
2	16 - 18 cm	8435025949621	6427015	PM0245.DR2
3	18 - 20 cm	8435025949638	6427016	PM0245.DR3
Universelle	> 16 cm	8435025949775	6427020	PM0245.DRU
GAUCHE				
Pédiatrique	< 10 cm	8435025949768	6427026	PM0245.GAP
Enfant	10 - 12 cm	8435025949751	6427025	PM0245.GAE
1	12 - 16 cm	8435025949720	6427021	PM0245.GA1
2	16 - 18 cm	8435025949737	6427022	PM0245.GA2
3	18 - 20 cm	8435025949744	6427023	PM0245.GA3
Universelle	> 16 cm	8435025949713	6427027	PM0245.GAU

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliaana Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbatais, 35520 La Mézière (France).


Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr


Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• **CONFORT PLUS® POIGNET MAIN** Attelle de poignet-main**⚠ PRÉCAUTIONS**

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :**Mise en place pour la taille standard :**

1. Enfiler l'attelle Confort Plus® poignet-main comme un gant en passant le pouce dans l'évidement prévu à cet effet.
2. Serrer les sangles, ajuster la tension au maintien souhaité puis fixer avec la zone auto-agrippante.

Mise en place pour la taille universelle :

1. Détacher l'éclisse dorsale et enfiler l'attelle Confort Plus® poignet-main comme un gant, en passant le pouce dans l'évidement prévu à cet effet.
2. Positionner l'éclisse dorsale en veillant bien à ce qu'elle soit alignée dans l'axe poignet/coude et fixer avec la zone agrippante.
3. Pour un positionnement optimal, veiller à ce que l'éclisse dorsale affleure le liseré bleu de l'attelle, côté avant-bras.
4. Serrer les sangles, ajuster la tension au maintien souhaité, puis fixer avec la zone auto-agrippante.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

