

BOTIMED® AIR LIGHT HAUTE

Botte de marche



TVA : 5,5%

LPPR : 64,40 € / 7132800

DOMAINE D'APPLICATION

Traumatologie, Post-opératoire.

INDICATIONS

Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (fracture distale du tibia ou du péroné), de la cheville et du pied, blessure au tendon d'Achille et aux ligaments (entorse de grade II et III), fasciite plantaire sévère, réduction de l'œdème, autres soins post-chirurgicaux ou post-traumatiques.

Lors de l'usage de ce produit, restreindre les activités à celles indiquées par le médecin.

CARACTÉRISTIQUES

Une botte de marche basse :

- 1 chausson enveloppant matelassé en tissu respirant,
- 1 coque d'immobilisation avec semelle profilée antidérapante en forme de balancier,
- 1 protège orteils,
- 1 pompe de gonflage intégrée avec vanne de régulation,
- 1 kit avec 3 coussinets de protection.

COMPOSITION

Chausson :

- Tissu intérieur et extérieur : polyester 100%.
- Mousse : polyuréthane 100%.

Pompe de gonflage :

- Tissu en nylon brossé : polyester 100%.

Poche d'air :

- Revêtement : polyester 100%.
- Structure : polyuréthane thermoplastique 100%.

Botte :

- Structure : polypropylène 100%.
- Semelle extérieure : éthylène acétate de vinyle 100%.
- Semelle intérieure : mousse d'éthylène acétate de vinyle 100%.
- Système de fermeture : polyamide 100%.
- Rivets : fer galvanisé noir 100%.

Taille	Pointure	Hauteur botte	Code Référent 13	ACL 7	Référence
1	34 - 38	37 cm	8435025950863	6447688	CP0322BI1
2	38 - 43	40 cm	8435025950870	6447689	CP0322BI2
3	43 - 46	40 cm	8435025950887	6447690	CP0322BI3
4	46 et +	40 cm	8435025950894	6447691	CP0322BI4

ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliaana Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbetais, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr


Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.


BOTIMED® AIR LIGHT BASSE Botte de marche

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs. Vérifiez l'état avant chaque utilisation. Une semelle cassée ou trop usée peut augmenter le risque de chute. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, cessez d'utiliser le produit et avertissez immédiatement l'établissement de distribution.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

Le port d'une attelle d'immobilisation dont la fonction est de limiter les mouvements rend incompatible la conduite d'un véhicule.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième chiffres représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme, mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

Il est conseillé de placer le produit en position assise et de porter, si possible, une chaussette en coton.

1. Ouvrir les fermetures auto-agrippantes de la botte sans la retirer de la coque rigide.
Insérer le pied dans la botte et dans la coque rigide d'immobilisation. Si nécessaire, placer les coussinets de protection sur les zones sensibles telles que le cou-de-pied ou les malléoles.
2. Disposer le protège orteils sur le bout du pied et refermer le chausson.
3. Refermer la botte grâce au système de fermeture par bandes auto-agrippantes.
Lorsque la mise en place est terminée, retirer la bande anti-adhésive blanche avec l'inscription «PULL UP» à son extrémité pour fixer le chausson à la bande agrippante de la coque rigide d'immobilisation.
4. Ajuster le maintien de façon à ce que l'articulation tibio-tarsienne soit parfaitement immobilisée.
S'assurer que l'articulation est maintenue à 90°.

5. Gonfler la poche d'air à l'aide de la pompe intégrée en tournant la valve dans le sens des aiguilles d'une montre.

Appuyer plusieurs fois sur la pièce orange jusqu'à obtenir la pression souhaitée.

NOTE : Pour libérer l'air, tourner la valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),

Rincer soigneusement.

Laisser sécher à l'air libre.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas javelliser.

Ne pas utiliser de détergent.

Conservé le produit à température ambiante.



Date de publication : 2026-02

Date de révision : 2026-02 | v.1

