

CEINTURE LOMBAIRE DE THERMOTHÉRAPIE



DOMAINE D'APPLICATION

Rhumatologie.

INDICATIONS

Arthrose lombaire (lombarthrose) débutante, Douleurs rhumatismales / Raideurs (articulaires et musculaires).

CARACTÉRISTIQUES

Ceinture lombaire de thermothérapie :

- 2 baleines dorsales souples,
- Fournie avec un coussin (PAD) de thermothérapie réutilisable et un sachet de conservation.

COMPOSITION

Matériau principal : polyamide 66%, élasthanne 34%.

Finition biais : polyamide 76%, élasthanne 24%.

Baleines dorsales : polypropylène 100%.

Doublure intérieure : polyamide 80%, élasthanne 20%.

Éléments de fermeture : polyamide 100%.

TVA : 20%

LPPR : Non remboursé

Prise de mesure : TOUR DE TAILLE, mesurer au niveau du nombril.

Taille	Tour de taille (cm)	Code référent 13	ACL 7	Référence
1	75 - 95	8435025951020	6447693	TR0242231
2	95 - 120	8435025951037	6447694	TR0242232
3	120 - 145	8435025951044	6447695	TR0242233

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliaana Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbets, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• CEINTURE LOMBAIRE DE THERMOTHÉRAPIE

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution. Au-delà de trois ans à compter de la date de la fabrication mentionnée sur l'emballage, les performances du dispositif sont susceptibles de présenter une altération de ses performances et de son aspect.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirez le produit et consultez immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs. Ne pas utiliser en cas d'allergies connues à l'un des composants.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

Le port d'une attelle d'immobilisation dont la fonction est de limiter les mouvements rend incompatible la conduite d'un véhicule.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades. Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

Après avoir préparé le coussin (PAD) de thermothérapie en suivant les instructions sur le sachet de conservation :

1. Placer la ceinture sur une surface plane.
2. Positionner le coussin (PAD) dans l'emplacement prévu à cet effet et rabattre la doublure.

Repérer le logo Orliman Prim'Arthrose se trouvant sur le plastron et le positionner vers le haut.

3. Positionner la ceinture dans le bas du dos (au niveau de la zone lombaire). Centrer la ceinture par rapport à votre colonne vertébrale en positionnant les 2 baleines postérieures de part et d'autre de votre colonne. Le bas de la ceinture doit se positionner sur la base du coccyx.

4. Étirer puis plaquer la partie droite du plastron sur votre ventre en la maintenant avec votre main.

5. Positionner la partie gauche de la ceinture avec le système de passe-doigts et fixer la zone auto-agrippante.

Renouveler l'opération en suivant les recommandations médicales de votre professionnel de santé.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon neutre ou à la machine (max. 30°C), Laisser sécher à l'air libre.

Ne pas javelliser.

Ne pas utiliser de détergent.

Conserver le produit à température ambiante.

Nettoyage à sec et sèche-linge déconseillés.

Retirer le coussin (PAD) de thermothérapie avant lavage. Pour l'entretien et la conservation du coussin de thermothérapie, reprendre les instructions indiquées sur son sachet de conservation.

